

# Papel transfer





Papel Unicornio en velcro



Papel unicornio en Streifylene



Papel cebra en Streifylene



# Excelente calidad, fácil de procesar

## Facilidad

El papel para colorear es fácil de aplicar, incluso con pliegues o arrugas. Es decir: ¿almacenamiento plegado? ¡Sin problema!

Independientemente del diseño, el procesamiento sigue siendo el mismo. Fácil de despegar, incluso sin spray de silicona.

## Vibrante

Una transferencia de color intensiva crea un resultado óptimo. Gracias al proceso especial del fabricante, las manchas posteriores se reducen enormemente: colores brillantes y ¡clientes satisfechos!

## Sostenible

Para la protección del clima y el medio ambiente: nuestro papel para colorear utiliza menos tinta y papel en la producción

## Versátil.

Aporta color a termoplásticos y textiles blancos. También adecuado para laminación de materiales de resina

# Qué diseño es tu favorito?

Todos los papeles para colorear tienen unas dimensiones de 1.000 x 1.600 mm El peso del papel es de 20 g/m<sup>2</sup>.



Papel transfer Carbon  
Referencia. 120P5/01




Papel transfer Mariposas  
Referencia. 120P5/02



Papel transfer Olas  
Referencia 120P5/03



Papel transfer Palmeras  
Referencia 120P5/04

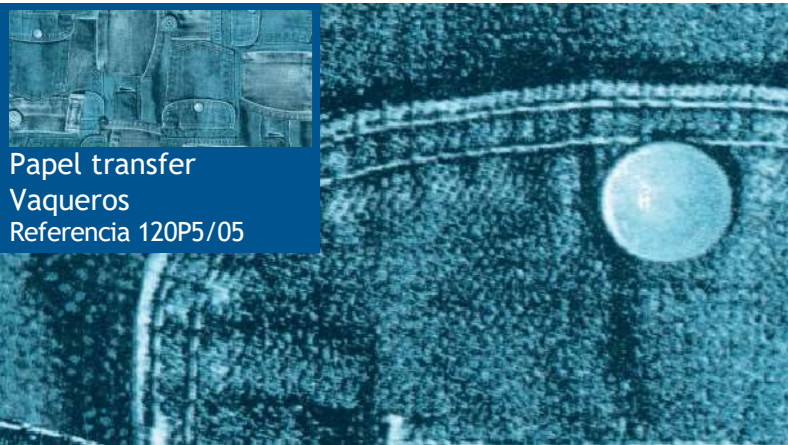

Papel transfer Vaqueros  
Referencia 120P5/05



Papel transfer Rosa  
Referencia 120P5/06




Papel transfer Camuflaje  
Referencia 120P5/07




Papel transfer Tatuaje  
Referencia 120P5/08



Papel transfer Hawaiana  
Referencia. 120P5/09

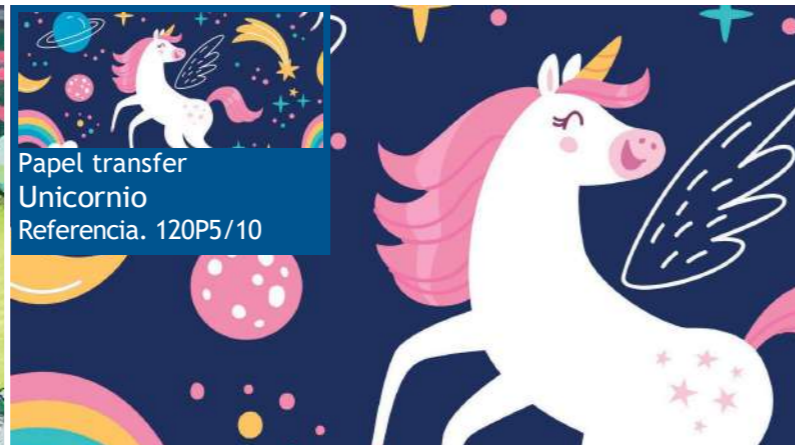

Papel transfer Unicornio  
Referencia. 120P5/10

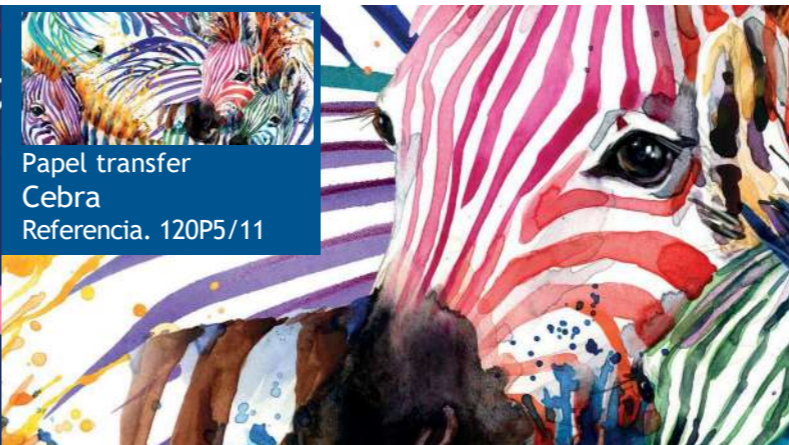

Papel transfer Cebra  
Referencia. 120P5/11



Papel transfer Dinosaurio  
Referencia. 120P5/12



Papel transfer Naturaleza  
Referencia. 120P5/13



Papel transfer Viajes  
Referencia. 120P5/14



Papel transfer Robot  
Referencia. 120P5/15

- Papel transfer Negro Ref. 120P5/16
- Papel transfer Carne Ref. 120P5/18
- Papel transfer Marrón Ref 120P5/20

- Papel transfer Azul Ref. 120P5/17
- Papel transfer Rojo Ref. 120P5/19

# Consejos para un resultado óptimo



## Consejo de procesamiento

Caliente el termoplástico cortado completamente a su temperatura de procesamiento especificada (min 140°C). A continuación, aplique el papel con la cara impresa sobre el plástico caliente.

**Consejo:** Deja una pequeña esquina del papel que sobresalga para que puedas agarrarlo fácilmente y despegarlo.

Después de solo 15 segundos, puede volver a despegar el papel y continuar procesando el plástico.

## Tenga en cuenta

Si es necesario, la placa de plástico se puede recalentar en el horno después de colorear. Esto hará que el diseño pierda parte de su nitidez e intensidad de color.

Para transferir el diseño a un tejido laminado blanco, una correa de poliéster, una correa de velcro, necesitará una plancha estándar y una superficie adecuada.

Ajuste la plancha a la temperatura más alta y planche el diseño.  
Tiempo de contacto: 15segundos


## Configurador de diseño



Sólo necesita escanear el Código QR.

Primero seleccione la órtesis que necesita y luego haga clic en nuestra amplia gama de diseños

[www.streifeneder.com/op/configurator](http://www.streifeneder.com/op/configurator)



Ayudas y Distribuciones Ideo S.L  
P. I Fuente del Rey  
C/ Alamo Gris 9-15  
41703 Dos Hermanas Sevilla  
T. 954680193 ext 1  
[ayd@ideo.es](mailto:ayd@ideo.es)  
[www.ayudasydistribuciones.com](http://www.ayudasydistribuciones.com)

This catalogue is protected by copyright.

Reproduction of the complete catalogue, even in abstracts, in any form or by any means is only permitted with explicit written authorisation of the Streifeneder ortho.production GmbH.

The indicated measurements and weights are guide values without obligation. The manufacturer reserves the right to make changes to the design or shape, deviations in colour and changes to the scope of delivery during the delivery period, provided that the object of purchase is not significantly changed and the changes are reasonable for the purchaser.

After the editorial deadline of the catalogue, 01.07.2022, changes to the product may occur.

The general terms and conditions apply, they can be viewed any time at [www.streifeneder.com/op](http://www.streifeneder.com/op).



[www.streifeneder.com/op](http://www.streifeneder.com/op)